

SORTIMENTSKATALOG STÜTZVERBÄNDE

EINFACH, INNOVATIV, INDIVIDUELL



SORTIMENTSÜBERSICHT

SCHIENEN UND CAST-VERBÄNDE	S. 06	TRIKOTSCHLAUCHVERBÄNDE	
FERTIGSCHIENENSYSTEM		Tricofix®	S. 40
Delta-Xpress™	S. 08	Delta-Net® Stockinette	S. 41
SYNTHETISCHE SCHIENEN-VERBÄNDE		POLSTERWATTEN	
Dynacast® Prelude	S. 10	Artiflex®	S. 42
Dynacast® AS	S. 12	Artiflex® Soft	S. 42
Dynacast® Prelude Strap Kits	S. 13	Artiflex® Natur	S. 42
GLASFASERFREIE CAST-VERBÄNDE		Delta-Rol® S	S. 43
Delta-Cast® Conformable	S. 14	Delta-Rol®	S. 44
Delta-Cast® Elite	S. 16	Specialist®	S. 45
Delta-Cast® Soft	S. 18	POLSTERZUBEHÖR	
Delta-Cast® Prints	S. 20	Tensoban®	S. 46
Delta-Cast® Mischpackungen	S. 22	Krepppapierbinde	S. 47
GLASFASER CAST-VERBÄNDE		GEHHILFEN UND ZUBEHÖR	S. 48
Delta-Lite® Conformable	S. 24	GEHHILFEN	
Delta-Lite® Plus	S. 25	Artistep® S	S. 50
NATURGIPS-VERBÄNDE	S. 26	Delta-Solo® Gehschuh	S. 51
Platrix®	S. 28	ZUBEHÖR	
Biplatrix®	S. 29	Delta Terry-Net™ Filzpolster	S. 52
Specialist® E	S. 30	Delta Terry-Net™ Schaumpolster	S. 53
POLSTERWATTEN UND SCHLAUCHVERBÄNDE	S. 32	Delta Terry-Net™ Randpolster	S. 54
WASSERFESTE POLSTERWATTE UND SCHLAUCHVERBÄNDE		Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System	S. 55
Delta-Dry® Softliner	S. 35	Elastomull® haft/Elastomull® haft color	S. 56
Delta-Dry® Polsterwatte	S. 37	ORIENTIERUNGSHILFE ZUR PRODUKTAUSWAHL	S. 58
POLSTERSCHLAUCHVERBÄNDE		SERVICE UND SCHULUNGEN	S. 60
Delta Terry-Net™ S	S. 38		
Delta Terry-Net™ C	S. 39		



SORTIMENTSKATALOG STÜTZVERBÄNDE

Die Behandlung von Frakturen gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten im Klinik- und Praxisalltag. BSN medical hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Sie bei der Anlage von **Starr- und Stützverbänden** bestmöglich mit fortschrittlichsten Produkten zu unterstützen.

Das Sortiment der Stützverbände bietet individuelle Lösungen, die Ihnen vor allem eine einfache, funktionelle und verlässliche Applikation ermöglichen. Der hohe Tragekomfort sorgt zudem dafür, dass auch Ihren Patienten der Umgang mit **Starr- und Stützverbänden** so angenehm wie möglich gemacht und die Compliance erhöht wird.

SCHIENEN UND CAST-VERBÄNDE

Zur Behandlung von Frakturen und Weichteilverletzungen jeglicher Art werden rigide bzw. flexible zirkuläre Verbände und Schienen eingesetzt. Darüber hinaus finden sie auch in der modernen Art der Immobilisierung, der „**Funktionellen-Cast-Therapie**“ (FCT), Anwendung.

Dafür bietet BSN medical für jeden Abschnitt der Therapie, von der Akutphase bis hin zur Rehabilitationsphase, die richtigen Produkte für jeden Anwendungsfall. Sie überzeugen durch ihr geringes Gewicht, ihre individuelle Farbgebung, ihre Stabilität sowie ihre Verlässlichkeit.

Die Produkte der **Delta-Cast®** und **Delta-Lite®** Reihe zeichnen sich insbesondere durch ihre ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit sowie durch einen exzellenten Lagenverbund aus. Damit gewährleisten sie neben einer einfachen Applikation vor allem eine sichere Immobilisierung.

Hinweis für alle Cast-Verbände: Für ein optimales Ergebnis achten Sie bitte darauf, dass die Tauchwassertemperatur 20 °C bis 25 °C entspricht. Auf diese Weise ergibt sich eine offene Zeit von 3 – 5 Minuten. Voll belastbar ist der Cast-Verband nach 20 Minuten.



PRODUKTÜBERSICHT

FERTIGSCHIENENSYSTEM

Delta-Xpress™ S. 08

SYNTHETISCHE SCHIENEN-VERBÄNDE

Dynacast® Prelude S. 10

Dynacast® AS S. 12

Dynacast® Prelude Strap Kits S. 13

GLASFASERFREIE CAST-VERBÄNDE

Delta-Cast® Conformable S. 14

Delta-Cast® Elite S. 16

Delta-Cast® Soft S. 18

Delta-Cast® Prints S. 20

Delta-Cast® Mischpackungen S. 22

GLASFASER CAST-VERBÄNDE

Delta-Lite® Conformable S. 24

Delta-Lite® Plus S. 25

DELTA-XPRESS™

DIE INNOVATIVE ART DER KURZFRISTIGEN IMMOBILISIERUNG

Delta-Xpress™ ist ein innovatives Fertigschienensystem für die schnelle, einfache und sichere Immobilisierung. Ob als Erstversorgung in der Akutphase, als postoperative Versorgung oder zur Weiterleitung in die weiterführende Diagnostik oder zu Spezialisten – Delta-Xpress™ ist immer die optimale Lösung.

Material: Innovativer Verbundstoff
Beschichtung: Weiches Vliesmaterial

Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Interimsversorgung
- Intuitives, fehlerfreies Anlegen
- Sichere Immobilisierung
- Individuell zuschneidbar
- Sofortige Funktionsstellung bietet Sicherheit
- Unterstützt die Schmerzreduktion
- Minimale Lagerkapazität

Anwendungsgebiete

- Akute Verletzungen aller Extremitäten
- Frakturen jeglicher Art
- Weichteilverletzungen
- Quetschungen
- Distorsionen
- Verletzungen am Bandapparat

Anwendungsdauer: kurzzeitig



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Passform

Passform bei Bedarf mit einer Schere individuell zuschneidbar



Fixierungshinweis

Zur Fixierung wird eine kohäsive Binde (Elastomull® haft / Elastomull® haft color) empfohlen.

Best.-Nr.	Größe	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Xpress™ Handgelenkschiene			
7271200	S	10	03969322
7271201	M	10	09533330
7271202	L	10	09533353
Delta-Xpress™ Handgelenkschiene mit Fingerauflage			
7271300	S	10	03969339
7271301	M	10	09533376
7271302	L	10	09533382
Delta-Xpress™ Ellenbogenschiene			
7271000	S	10	09531420
7271001	M	10	09533169
7271002	L	10	09533175
Delta-Xpress™ Unterschenkelschiene			
7271100	S	10	09533181
7271101	M	10	09533198
7271102	L	10	09533206

DIE PRODUKTFAMILIE VON DELTA-XPRESS™

DIE VERLÄSSLICHE LÖSUNG FÜR ALLE FÄLLE



100-prozentige Röntgentransparenz erleichtert die Diagnostik



Weiches Vliesmaterial gewährleistet hohen Komfort und Feuchtigkeitsausgleich



Die **Passform** ist bei Bedarf mit einer Schere individuell zuschneidbar



Offene Konstruktion ermöglicht einfachen Zugang zu Wunden



Hohe Luftdurchlässigkeit hilft Hautirritationen vorzubeugen



Integrierte Messleiste und Farbcode dienen der schnellen Größermittlung


HANDGELENKSCHIENE

Das Handgelenk kann einfach in Funktionsstellung gebracht und stabilisiert werden. Die Verstärkung durch eine Kunststoff-schiene bietet maximale Stabilität.



HANDGELENKSCHIENE MIT FINGERAUFLAGE

Der 100°-Winkel unterstützt das Mittelhandgelenk und stabilisiert das Handgelenk in 30°-Dorsalextension.

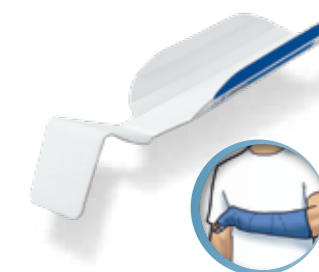

UNTERSCHENKELSCHIENE

Fußeinlage und selbstklebende Malleolarpolsterung sorgen für erhöhten Tragekomfort. Der vordefinierte 90°-Winkel und die Aussparung im Fersenbereich sorgen für eine ideale Stellung des Unterschenkels, Fußknöchels und Fußes.



ELLENBOGENSCHIENE

Der 90°-Winkel und die Aussparung im Ellenbogenbereich sorgen für eine sichere Stellung von Oberarm, Ellenbogen und Unterarm.



Sieger im Röntgenbildvergleich: die Delta-Xpress™-Produktfamilie



Delta-Xpress™

Delta-Xpress™

SAM Splint

Cramerschiene

Korkschiene

Weißgips

DYNACAST® PRELUDE

SCHIENENVERSORGUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Dynacast® Prelude ist ein einfach zu handhabendes und extrem vielseitiges Schienensystem. Das Geheimnis des einlagigen Glasfaserkerns liegt in der patentierten 3D-Strick-Technologie. Dadurch lässt sich die doppelseitig gepolsterte Schiene beim Anlegen extrem gut anformen. Dynacast® Prelude – der einzigartige „splint to go“.

Material: Glasfasergewebe
Beschichtung: Polyurethanharz

Vorteile auf einen Blick

- Einlagiger Glasfaserkern mit 3D-Gewebestruktur bietet Sicherheit
- Perfekte Anpassungsfähigkeit
- Einfaches Zuschneiden
- Durch beidseitige Polypropylenpolsterung vielseitig einsetzbar
- Faltenfreie Anlage

Anwendungsgebiete

Teilweise oder vollständige Ruhigstellung bei:


- Distorsionen
- Weichteil-, Kapsel- oder Bandverletzungen
- Sehnenverletzungen
- Frakturen
- Zur Stützung von Weichteilverletzungen und Fissuren

Anwendungsdauer:


Einige Tage bis zu mehreren Wochen



GERINGERE REINIGUNGSZEIT*

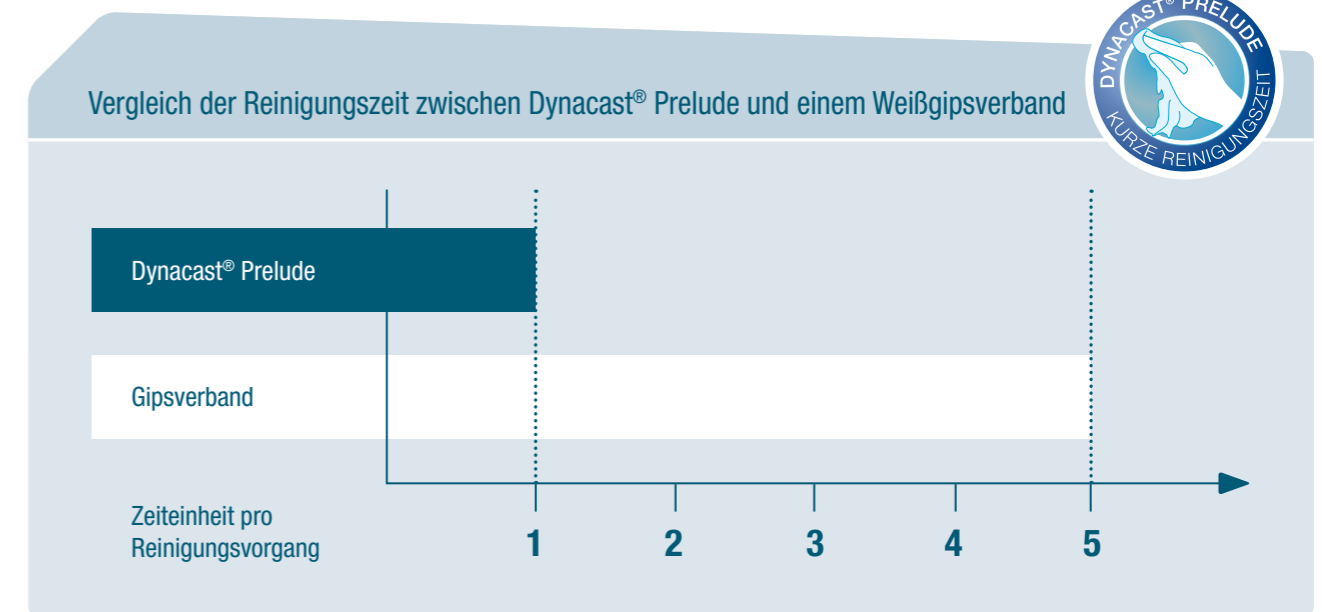

* Reinigungszeit reduziert sich auf ca. 20% bei Nutzung von Dynacast® Prelude statt Weißgips. Quelle: BSN medical, interne Untersuchung.

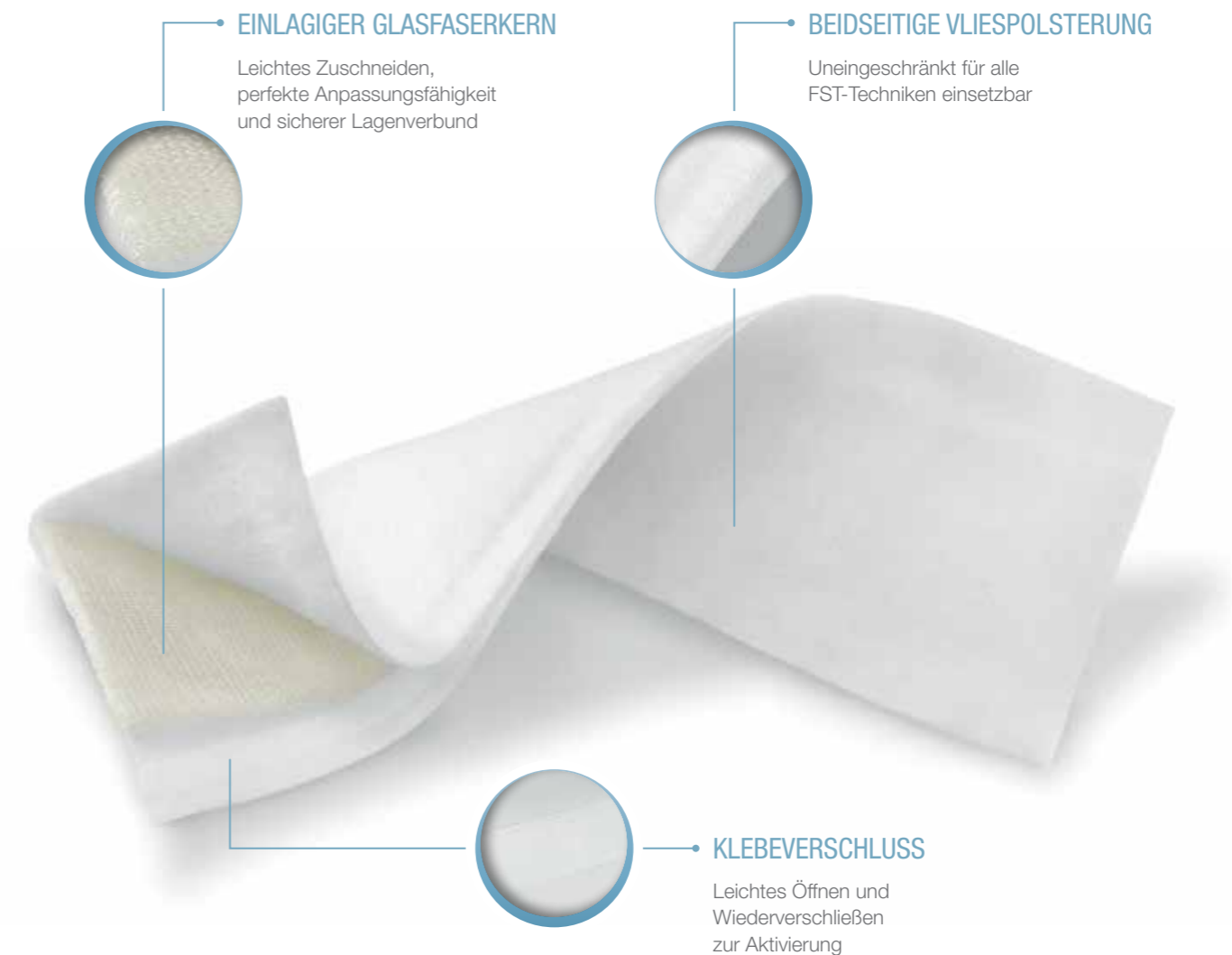

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Dynacast® Prelude, Rollenware			
7141800	2,5 cm x 4,6 m	1/2	07465788
7142000	5,0 cm x 4,6 m	1/2	07465794
7142100	7,5 cm x 4,6 m	1/2	07465802
7141500	10,0 cm x 4,6 m	1/2	07465819
7141600	12,5 cm x 4,6 m	1/2	07465765
7141700	15,0 cm x 4,6 m	1/2	07465771
7141900	20,0 cm x 2,3 m	1/2	00816629

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Dynacast® Prelude Splints, vorgeschnitten			
7286900	5,0 cm x 25,0 cm	5/20	02405787
4722200	7,5 cm x 30,0 cm	5/20	01869036
4722300	7,5 cm x 40,0 cm	5/20	01869160
4722400	10,0 cm x 30,0 cm	5/20	01869094
4722500	10,0 cm x 40,0 cm	5/20	01869220
4722600	10,0 cm x 76,0 cm	4/16	01869243
4722700	12,5 cm x 65,0 cm	4/16	01869131
4723500	12,5 cm x 76,0 cm	4/16	01869289

Hinweis: Für das Fixieren von Dynacast® Prelude eignet sich besonders die kohäsive Fixierbinde Elastomull® haft (siehe S. 56).

DYNACAST® AS

DIE SPRUNGGELENKSCHIELE MIT DER INDIVIDUELLEN PASSFORM

Dynacast® AS ist eine individuell modellierbare, leichte und komfortable Sprunggelenkschiene. Durch die Klettbandfixierung ist **Dynacast® AS** unter dem Fuß größenverstellbar.

Material: Glasfasermaterial mit Polyurethanbeschichtung und mikroperforierter Schaumpolsterung



Vorteile auf einen Blick

- Passt in fast jeden Schuh
- Frühfunktionelle Behandlung
- Kontrollierte Bewegungseinschränkung
- Atmungsaktiv
- Hämatombehandlung / Kältetherapie möglich

Anwendungsgebiete

- Ruhigstellung & Entlastung des oberen Sprunggelenkes
- Kontrollierte Ödembehandlung
- Unterstützung der Rehabilitationsphase
- Förderung einer frühen Wiedereingliederung in den Alltag

Anwendungsdauer:

Einige Tage bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Dynacast® AS, Komplettsset			
7136100	Größe S/M ≤ 165 cm	1/6	00738958
7136000	Größe M/L ≥ 165 cm	1/6	00738964
Dynacast® AS, 10er-Packung			
7283400	Größe S/M ≤ 165 cm	10/10	02728125
7283500	Größe M/L ≥ 165 cm	10/10	02728119

DYNACAST® PRELUDE STRAP KITS

DAS SPEZIELLE KLETTVERSCHLUSS-SYSTEM

Das **Dynacast® Prelude** Strap Kits Klettverschluss-System macht aus einer herkömmlichen Schienenversorgung eine nahezu perfekt angepasste, individuelle Orthese. Das **Dynacast® Prelude** Strap Kits Klettverschluss-System wird direkt auf der Polsterung der zuvor angepassten und ausgehärteten **Dynacast® Prelude** Schiene befestigt.

Material: Dehnbare Velstretch® Bänder



Vorteile auf einen Blick

- Vereinfacht das Anlegen von Schienen
- Komfortabel für Anwender und Patient
- Selbst. Schienenabnahme durch den Patienten möglich (z.B. für Rehabilitationsmaßnahmen)

Anwendungsgebiete

- Für Funktionelle-Splint-Therapie (FST) und Rehabilitationsphase (z.B. Muskelaufbau, Hydrotherapie)

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Verp.-Einheit	PZN
Dynacast® Prelude Strap Kits, obere Extremitäten, rot		
7141518	10/10	00849959
Dynacast® Prelude Strap Kits, untere Extremitäten, blau		
7141519	10/10	00849965

DELTA-CAST® CONFORMABLE

DER BESTE SEINER KLASSE

Delta-Cast® Conformable setzt höchste Maßstäbe bei zirkulären abnehmbaren Cast-Verbindungen aus Polyester. Seine Vielseitigkeit macht Delta-Cast® Conformable zu einem wahren Multitalent in der täglichen Versorgung von Frakturen jeder Art. Das Geheimnis liegt dabei in der Kombination vieler anwenderfreundlicher Produkteigenschaften, die Delta-Cast® Conformable zur Nr. 1 weltweit machen.

Material: 3D-Stretch-Polyestergewirk

Beschichtung: Wasseraktivierbares Polyurethanharz



Vorteile auf einen Blick

- Exzellente Anpassungsfähigkeit dank 3D-Stretch-Gewebe
- Faltenfreie Applikation ohne jegliche Druckpunkte
- Zuverlässiger Lagenverbund
- Vielseitiges Anwendungsspektrum
- Belastbar nach ca. 20 Min.
- 2-3 Lagen sind problemlos mit der Schere zu schneiden

Anwendungsgebiete

- Für zirkuläre Cast-Verbindungen
- Für Funktionelle-Cast-Therapie

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Cast® Conformable				
7228000	weiß	2,5 cm x 1,8 m	10/10	03734300
7228001	weiß	5,0 cm x 3,6 m	10/10	04590820
7228002	weiß	7,5 cm x 3,6 m	10/10	04590837
7228003	weiß	10,0 cm x 3,6 m	10/10	04590843
7228004	weiß	12,5 cm x 3,6 m	10/10	04590866
7228200	blau	5,0 cm x 3,6 m	10/10	04590903
7228201	blau	7,5 cm x 3,6 m	10/10	04590926
7228202	blau	10,0 cm x 3,6 m	10/10	04590932
7228500	rot	5,0 cm x 3,6 m	10/10	01426899
7228501	rot	7,5 cm x 3,6 m	10/10	01426497
7228502	rot	10,0 cm x 3,6 m	10/10	01426729
7228700	grün	5,0 cm x 3,6 m	10/10	01426451
7228701	grün	7,5 cm x 3,6 m	10/10	01426439
7228702	grün	10,0 cm x 3,6 m	10/10	01426474
7228400	orange	5,0 cm x 3,6 m	10/10	04590978
7228401	orange	7,5 cm x 3,6 m	10/10	04590984

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7228402	orange	10,0 cm x 3,6 m	10/10	04590990
7228300	gelb	5,0 cm x 3,6 m	10/10	04590949
7228301	gelb	7,5 cm x 3,6 m	10/10	04590955
7228302	gelb	10,0 cm x 3,6 m	10/10	04590961
7228600	lila	5,0 cm x 3,6 m	10/10	01426942
7228601	lila	7,5 cm x 3,6 m	10/10	01426913
7228602	lila	10,0 cm x 3,6 m	10/10	01426965
7228100	pink	5,0 cm x 3,6 m	10/10	04590872
7228101	pink	7,5 cm x 3,6 m	10/10	04590889
7228102	pink	10,0 cm x 3,6 m	10/10	04590895
7228800	schwarz	5,0 cm x 3,6 m	10/10	02845919
7228801	schwarz	7,5 cm x 3,6 m	10/10	02845925
7228802	schwarz	10,0 cm x 3,6 m	10/10	02845931
Delta-Cast® Conformable Mischpackung mit versch. Farben*				
7228910		5,0 cm x 3,6 m	10/10	11330309
7228911		7,5 cm x 3,6 m	10/10	11330315
7228912		10,0 cm x 3,6 m	10/10	11330321

* Die Mischpackungen von Delta-Cast® Conformable enthalten die Farben Dunkelblau, Schwarz, Rot, Lila und Pink. Je zwei Rollen pro Farbe/Packung.


UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

DURCH DIE FUNKTIONELLE-CAST-THERAPIE



HERVORRAGENDE HANDHABUNG

FÜR MEHR ARBEITSEFFIZIENZ

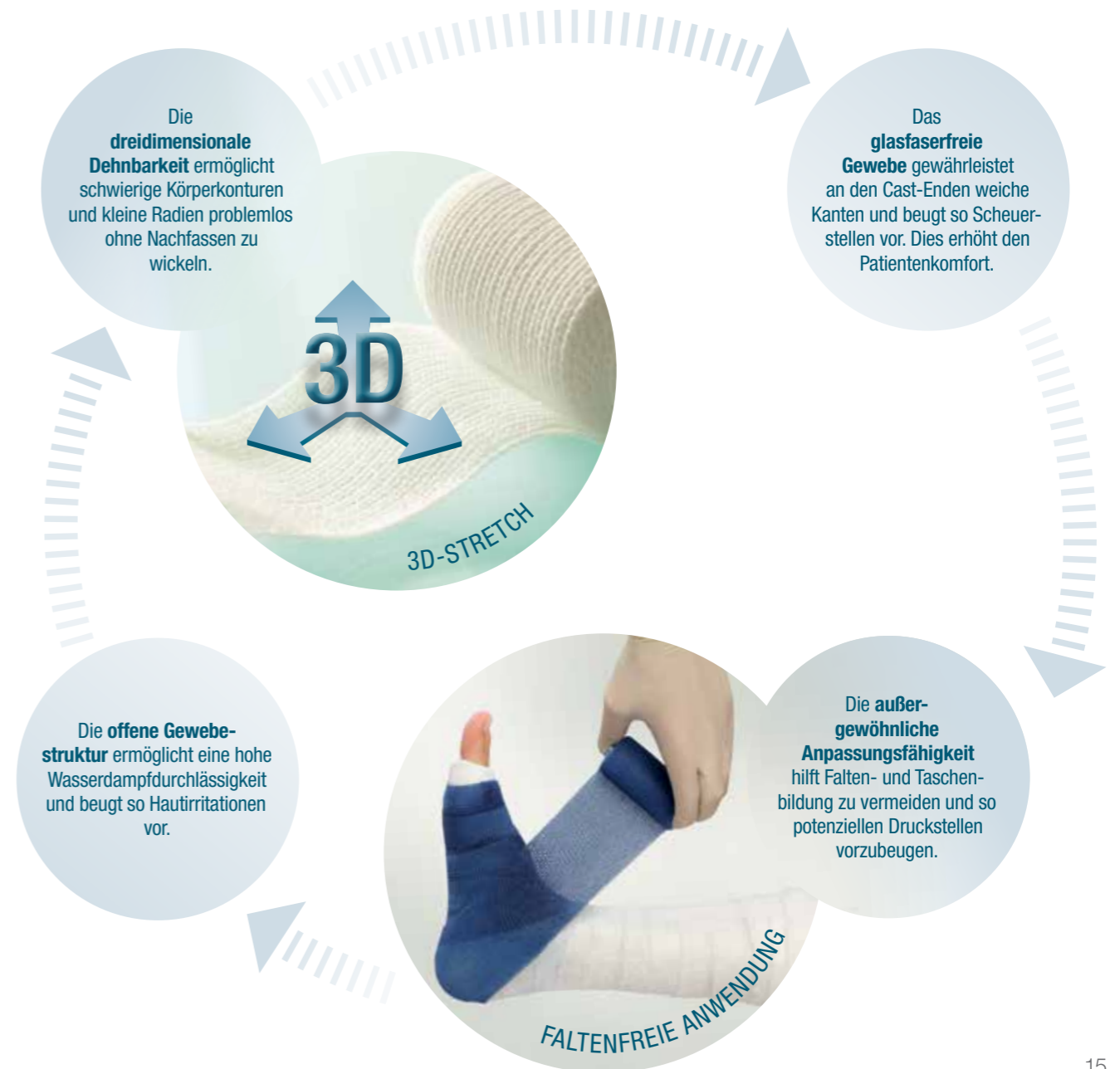

DELTA-CAST® ELITE

DIE FORTSCHRITTLICHE LÖSUNG

Delta-Cast® Elite vereint alle Vorteile eines fortschrittlichen glasfaserfreien Castmaterials. Delta-Cast® Elite ist ein leichter, aber rigider glasfaserfreier Cast-Verband, der entwickelt wurde, um dem Anwender eine einfache Applikation und dem Patienten einen hohen Tragekomfort zu bieten.

Material: Elastisches Polyestergewirk

Beschichtung: Wasseraktivierbares Polyurethanharz

Vorteile auf einen Blick

- Gute Anpassungsfähigkeit
- Verlässlicher Lagenverbund
- Sichere Immobilisierung
- Glatte Oberfläche und weiche Kanten
- Kosteneffiziente Lösung
- Belastbar nach ca. 20 Min.

Anwendungsgebiete

- Für rigide zirkuläre Cast-Verbände und Schienen

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX-FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



RÖNTGEN-TRANSPARENT

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Cast® Elite				
7227904	weiß	2,5 cm x 1,8 m	10/10	04780762
7227900	weiß	5,0 cm x 3,6 m	10/10	07504695
7227901	weiß	7,5 cm x 3,6 m	10/10	07504703
7227902	weiß	10,0 cm x 3,6 m	10/10	07504726
7227903	weiß	12,5 cm x 3,6 m	10/10	07504732
7227600	blau	5,0 cm x 3,6 m	10/10	07550442
7227601	blau	7,5 cm x 3,6 m	10/10	07550465
7227602	blau	10,0 cm x 3,6 m	10/10	07550488
7227500	rot	5,0 cm x 3,6 m	10/10	07550376
7227501	rot	7,5 cm x 3,6 m	10/10	07550399
7227502	rot	10,0 cm x 3,6 m	10/10	07550413
7345400	grün	5,0 cm x 3,6 m	10/10	05382644
7345401	grün	7,5 cm x 3,6 m	10/10	05382650
7345402	grün	10,0 cm x 3,6 m	10/10	05382667
7227700	lila	5,0 cm x 3,6 m	10/10	07550560
7227701	lila	7,5 cm x 3,6 m	10/10	07550583

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7227702	lila	10,0 cm x 3,6 m	10/10	07550614
7227800	schwarz	5,0 cm x 3,6 m	10/10	07550637
7227801	schwarz	7,5 cm x 3,6 m	10/10	07550666
7227802	schwarz	10,0 cm x 3,6 m	10/10	07550689
Delta-Cast® Elite Mischpackung mit versch. Farben*				
7345700		5,0 cm x 3,6 m	10/10	11330278
7345701		7,5 cm x 3,6 m	10/10	11330284
7345702		10,0 cm x 3,6 m	10/10	11330290
Delta-Cast® Elite Longetten 3-lagig				
7454507	weiß	5,0 cm x 20 cm	10/10	03971394
7454508	weiß	7,5 cm x 20 cm	10/10	03971402
7454509	weiß	7,5 cm x 38 cm	10/10	03971856
7454506	weiß	7,5 cm x 76 cm	10/10	03971922
Delta-Cast® Elite Longetten 5-lagig				
7454503	weiß	10,0 cm x 38 cm	10/10	07783991
7454504	weiß	10,0 cm x 90 cm	10/10	07784016
7454505	weiß	12,5 cm x 90 cm	10/10	07784022

* Die Mischpackungen von Delta-Cast® Elite enthalten die Farben Dunkelblau, Hellblau, Rot, Lila und Pink. Je zwei Rollen pro Farbe/Packung.

DELTA-CAST® ELITE

ENTSCHEIDENDE VORTEILE



ELASTISCHES TRÄGERMATERIAL

Hohe Elastizität des Trägermaterials erlaubt ein **faltenfreies Anwickeln** auch an problematischen Konturen.



EXZELLENTE ABROLLVERHALTEN

Begünstigt **durchgängiges Wickeln** und ermöglicht es, Überdehnung und Einschnüren zu vermeiden.



SICHERE LAMINATION

Verwandelt den zuverlässigen Lagenverbund zu einer stabilen Einheit und gewährleistet eine **starke Immobilisation**.



DELTA-CAST® SOFT

DIE FLEXIBLE LÖSUNG

Der glasfaserfreie **Delta-Cast® Soft** gewährleistet bei Frakturen und Weichteilverletzungen eine optimale funktionelle Unterstützung. Semi-rigide Stützverbände erlauben größtmögliche Flexibilität und hohe Formstabilität. Der Cast nimmt immer wieder seine Ausgangsform an und stellt dadurch genau das richtige Maß an Ruhigstellung sicher.

Material: Flexibles Polyestergewirk

Beschichtung: Wasseraktivierbares Polyurethanharz

Vorteile auf einen Blick

- Frühe Patientenmobilität
- Flexibles Material fördert den Heilungsprozess
- Hohe Anpassungsfähigkeit ermöglicht faltenfreie Anlage
- Sehr gute Rückstellkraft des fertigen Verbandes
- Belastbar nach ca. 20 Min.
- Weiche Kanten beugen Druckstellen vor

Anwendungsgebiete

- Für zirkuläre Cast-Verbände
- Für Funktionelle-Cast-Therapie (FCT)

Anwendungsdauer:

Einige Tage bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Cast® Soft				
7270802	weiß	2,5 cm x 1,8 m	10/10	09275709
7270812	weiß	5,0 cm x 3,6 m	10/10	09275715
7270822	weiß	7,5 cm x 3,6 m	10/10	09275721
7270832	weiß	10,0 cm x 3,6 m	10/10	09275738
7270842	weiß	12,5 cm x 3,6 m	10/10	09275744
7270835	blau	2,5 cm x 1,8 m	10/10	14366667
7270805	blau	5,0 cm x 3,6 m	10/10	09275595
7270815	blau	7,5 cm x 3,6 m	10/10	09275649
7270825	blau	10,0 cm x 3,6 m	10/10	09275661
7270808	rot	5,0 cm x 3,6 m	10/10	09275678
7270818	rot	7,5 cm x 3,6 m	10/10	09275684
7270828	rot	10,0 cm x 3,6 m	10/10	09275690

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7270801	schwarz	5,0 cm x 3,6 m	10/10	09275477
7270811	schwarz	7,5 cm x 3,6 m	10/10	09275508
7270821	schwarz	10,0 cm x 3,6 m	10/10	09275514
7270850	pink	5,0 cm x 3,6 m	10/10	02493633
7270851	pink	7,5 cm x 3,6 m	10/10	02494897
7270852	pink	10,0 cm x 3,6 m	10/10	02494940
7270809	Bärenatze	5,0 cm x 3,6 m	10/10	09275543
7270819	Bärenatze	7,5 cm x 3,6 m	10/10	09275566
7270860	Herzmotiv	5 cm x 3,6 cm	10/10	10055700
7270861	Herzmotiv	7,5 cm x 3,6 cm	10/10	10055717
Delta-Cast® Soft Mischpackung mit versch. Farben/Motiven*				
7270890		5,0 cm x 3,6 m	10/10	16023368
7270891		7,5 cm x 3,6 m	10/10	16023374

* Mischpackungen: Blau, Rot, Schwarz, Bärenatze, Herzmotiv. Je zwei Rollen pro Farbe/Packung.

DELTA-CAST® SOFT

EINFACHE HANDHABUNG FÜR DEN ANWENDER

- Leichtes Abrollverhalten ermöglicht eine gleichmäßige Verbandsstruktur
- Keine zusätzliche Polsterung notwendig

- Einfache & schnelle Abnahme mittels Verbandsschere oder manuellen Abwickelns
- Reduziert die Unsicherheit junger Patienten bei der Verbandabnahme, da keine Castsäge benötigt wird

- Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten in der Funktionellen-Cast-Therapie
- Zusätzliche Stabilisierung ist durch den Einsatz einer Longette möglich



DELTA-CAST® PRINTS

DIE SPIELERISCHE LÖSUNG

Delta-Cast® Prints ist weltweit der einzige patentierte bedruckte Stützverband. Seine farbenfrohen Muster und eine besonders unkomplizierte und schnelle Applikation helfen jungen Patienten ihre Angst vor dem Besuch beim Arzt und dem Anlegen des Casts zu überwinden.

Material: Elastisches Polyestergerwek

Beschichtung: Wasseraktivierbares Polyurethanharz

Vorteile auf einen Blick

- Erhältlich in verschiedenen Motiven
- Hohe Patienten-Compliance
- Schnelle und sichere Immobilisierung
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Weiche Kanten
- Belastbar nach ca. 20 Min.
- Leicht und stabil

Anwendungsgebiete

- Für rigide zirkuläre Cast-Verbände und Schienen

Anwendungsdauer:


Einige Tage bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Cast® Prints, Dinosaurier			
7227302	5,0 cm x 3,6 m	10/10	02129117
Delta-Cast® Prints, Teddybären			
7227305	5,0 cm x 3,6 m	10/10	02129169
Delta-Cast® Prints, Pastel Print			
7227317	5,0 cm x 3,6 m	10/10	09668811
7227307	7,5 cm x 3,6 m	10/10	02129181
Delta-Cast® Prints, Fußballle			
7227308	5,0 cm x 3,6 m	10/10	00368970
7227309	7,5 cm x 3,6 m	10/10	00424160
Delta-Cast® Prints, Bärenatzen			
7227320	5,0 cm x 3,6 m	10/10	00424326
7227321	7,5 cm x 3,6 m	10/10	00424361
Delta-Cast® Prints, Wintermotiv (nur saisonal erhältlich)			
7227303	5,0 cm x 3,6 m	10/10	02129123
7227304	7,5 cm x 3,6 m	10/10	02129146
Delta-Cast® Prints Mischpackung mit versch. Motiven*			
7227360	5,0 cm x 3,6 m	10/10	16023380
7227361	7,5 cm x 3,6 m	10/10	16023397

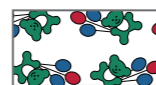

* 2 Binden je Motiv in einer Packung: Pastel, Bärenatzen, Fußballmotiv, Camouflage, Pink Camouflage

DELTA-CAST® PRINTS

DER BUNTE HELFER IM CAST-RAUM

Die sechs unterschiedlichen Muster sorgen für eine gelungene Abwechslung im Cast-Alltag

2- bis 3-lagig kann Delta-Cast® Prints anstatt der Säge auch mit der Verbandschere aufgeschnitten werden und reduziert somit die Unsicherheit der Patienten

Die individuelle Musterwahl erhöht die Patientenzufriedenheit

Das Polyestergerewebe ist röntgen-transparent und erspart einen Castwechsel



DIE DELTA-CAST® MISCHPACKUNGEN

5 FARBEN/MOTIVE IN EINER PACKUNG

Die einzigartigen Mischpackungen von **Delta-Cast® Conformable**, **Delta-Cast® Elite**, **Delta-Cast® Soft** und **Delta-Cast® Prints** bieten Ihnen und Ihren Patienten nicht nur mehr Auswahl und zusätzliche Farben, sondern auch die Möglichkeit einer optimierten Lagerhaltung.

DELTA-CAST® CONFORMABLE

Delta-Cast® Conformable setzt höchste Maßstäbe bei zirkulären abnehmbaren Cast-Verbänden aus Polyester.

Dunkelblau, Schwarz, Rot, Lila, Pink



DELTA-CAST® ELITE

Delta-Cast® Elite ist ein leichter, aber rigider Cast-Verband, der Anwendern eine einfache Applikation und dem Patienten einen hohen Tragekomfort bietet.

Dunkelblau, Hellblau, Rot, Lila, Pink



DELTA-CAST® SOFT

Der glasfaserfreie **Delta-Cast® Soft** gewährleistet bei Frakturen und Weichteilverletzungen eine optimale funktionelle Unterstützung.

Blau, Rot, Schwarz, Bärenatze, Herzmotiv



DELTA-CAST® PRINTS


Die farnefrohen Muster und die besonders unkomplizierte und schnelle Applikation können jungen Patienten helfen ihre Angst vor dem Besuch beim Arzt und der Anlage eines Cast-Verbands zu überwinden.

Pastel, Bärenatzen, Fußballmotiv, Camouflage, Pink Camouflage



Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Cast® Conformable Mischpackung				
7228910		5,0 cm x 3,6 m	10/10	11330309
7228911		7,5 cm x 3,6 m	10/10	11330315
7228912		10,0 cm x 3,6 m	10/10	11330321
Delta-Cast® Elite Mischpackung				
7345700		5,0 cm x 3,6 m	10/10	11330278
7345701		7,5 cm x 3,6 m	10/10	11330284
7345702		10,0 cm x 3,6 m	10/10	11330290
Delta-Cast® Soft Mischpackung				
7270890		5,0 cm x 3,6 m	10/10	16023368
7270891		7,5 cm x 3,6 m	10/10	16023374
Delta-Cast® Prints Mischpackung				
7227360		5,0 cm x 3,6 m	10/10	16023380
7227361		7,5 cm x 3,6 m	10/10	16023397

BRINGEN SIE MEHR FARBE IN IHREN CAST-RAUM!

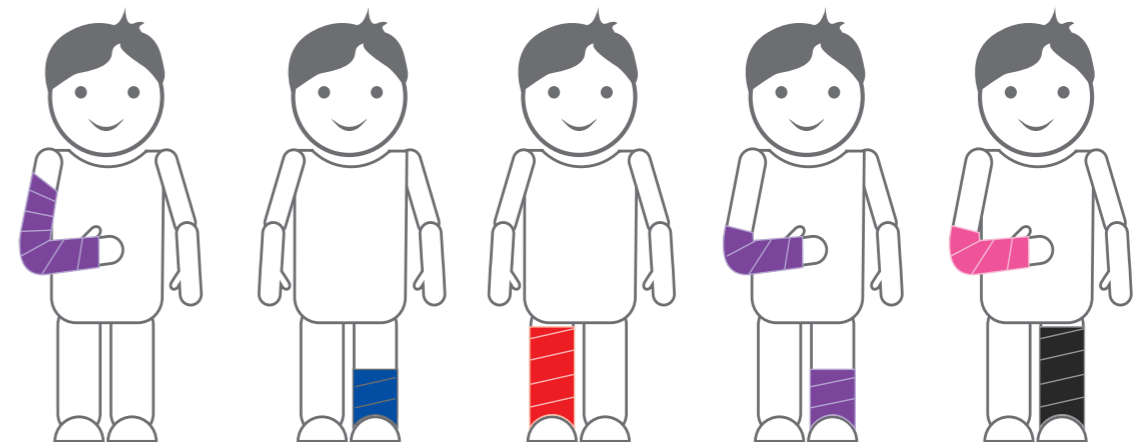

DELTA-LITE® CONFORMABLE

DIE FORTSCHRITTLICHE, HALTBARE LÖSUNG

Die ausgezeichnete Handhabung macht **Delta-Lite® Conformable** zu einem der fortschrittlichsten Glasfaserstützverbände auf dem Markt. Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und die innovative Harzrezeptur garantieren eine sichere und dauerhafte Versorgung.

Material: Elastisches Glasfasergewirk

Beschichtung: Wasseraktivierbares Polyurethanharz



Vorteile auf einen Blick

- Hohe Anpassungsfähigkeit auch an schwierigen Körperregionen
- Rigide und dauerhafte Immobilisierung
- Sicherer Lagenverbund
- Leichtigkeit und Stabilität
- Erhöhter Komfort

Anwendungsgebiete

- Für stark beanspruchte Stützverbände (Gehverbände am Unterschenkel)
- Für Frakturen und Verletzungen, die eine komplette Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Lite® Conformable				
7227000	weiß	5,0 cm x 3,6 m	10/10	03389412
7227001	weiß	7,5 cm x 3,6 m	10/10	03389441
7227002	weiß	10,0 cm x 3,6 m	10/10	03389470
7227003	weiß	12,5 cm x 3,6 m	10/10	03389501
7226600	blau	5,0 cm x 3,6 m	10/10	04252721
7226601	blau	7,5 cm x 3,6 m	10/10	04252744
7226602	blau	10,0 cm x 3,6 m	10/10	04252767
7226500	rot	5,0 cm x 3,6 m	10/10	04252661
7226501	rot	7,5 cm x 3,6 m	10/10	04252684
7226502	rot	10,0 cm x 3,6 m	10/10	04252709
7226700	grün	5,0 cm x 3,6 m	10/10	04252796
7226701	grün	7,5 cm x 3,6 m	10/10	04252810
7226702	grün	10,0 cm x 3,6 m	10/10	04252833

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7226800	lila	5,0 cm x 3,6 m	10/10	07535980
7226801	lila	7,5 cm x 3,6 m	10/10	07536005
7226802	lila	10,0 cm x 3,6 m	10/10	07536028

DELTA-LITE® PLUS

DIE ZUVERLÄSSIG-RIGIDE LÖSUNG

Delta-Lite® Plus ist die Lösung, wenn es bei Frakturen insbesondere auf eine stabile und langanhaltende Versorgung ankommt. Das Glasfasermaterial sorgt gemeinsam mit der speziell formulierten Harzrezeptur für eine verlässliche Ruhigstellung.

Material: Elastisches Glasfasergewebe

Beschichtung: Wasseraktivierbares Polyurethanharz



Vorteile auf einen Blick

- Starker Halt
- Verlässlicher Lagenverbund
- Exzellentes Abrollverhalten
- Glatte Oberfläche
- Kosteneffiziente Lösung

Anwendungsgebiete

- Für stark beanspruchte Stützverbände (Gehverbände am Unterschenkel)
- Für Frakturen und Verletzungen, die eine komplette Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Lite® Plus				
7345801	weiß	5,0 cm x 3,6 m	10/10	00257302
7345802	weiß	7,5 cm x 3,6 m	10/10	00265945
7345803	weiß	10,0 cm x 3,6 m	10/10	00277457
7345804	weiß	12,5 cm x 3,6 m	10/10	00277463
7345820	blau	5,0 cm x 3,6 m	10/10	00277486
7345821	blau	7,5 cm x 3,6 m	10/10	00277492
7345822	blau	10,0 cm x 3,6 m	10/10	00445280
7345830	rot	5,0 cm x 3,6 m	10/10	00605329
7345831	rot	7,5 cm x 3,6 m	10/10	00673555
7345832	rot	10,0 cm x 3,6 m	10/10	00803118
7345865	gelb	5,0 cm x 3,6 m	10/10	01292223
7345866	gelb	7,5 cm x 3,6 m	10/10	01292252
7345867	gelb	10,0 cm x 3,6 m	10/10	01313184

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7345860	lila	5,0 cm x 3,6 m	10/10	01291063
7345861	lila	7,5 cm x 3,6 m	10/10	01291407
7345862	lila	10,0 cm x 3,6 m	10/10	01291703
Delta-Lite® Plus Longetten				
7348500	weiß	5,0 cm x 20 cm	10/10	00314106
7348501	weiß	7,5 cm x 20 cm	10/10	00314112
7227200	weiß	7,5 cm x 38 cm	10/10	00314081
7348502	weiß	7,5 cm x 76 cm	10/10	00314129
7348503	weiß	10,0 cm x 38 cm	10/10	00314135
7227201	weiß	10,0 cm x 90 cm	10/10	00314098
7348504	weiß	12,5 cm x 90 cm	10/10	00314141

NATURGIPS-VERBÄNDE

Die Versorgung von Frakturen verlangt ein bewährtes Bindematerial, das einfach zu verarbeiten und sehr gut anmodellierbar ist. Die Naturgips-Verbände **Platrix®**, **Biplatrix®** und **Specialist® E** erfüllen diese Anforderungen und bieten darüber hinaus eine hohe Wirtschaftlichkeit. Sie werden zur Primärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen sowie zur Sekundärversorgung eingesetzt, die eine Ruhigstellung erfordern.

Hinweis für alle Naturgips-Verbände: Für ein optimales Ergebnis achten Sie bitte darauf, dass die Tauchwassertemperatur 20 °C bis 25 °C entspricht. Auf diese Weise ergibt sich eine offene Zeit von 2-4 Minuten. Teilbelastbar sind alle Naturgips-Verbände nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden.

PRODUKTÜBERSICHT

NATURGIPS-VERBÄNDE

Platrix®	S. 28
Biplatrix®	S. 29
Specialist® E	S. 30



PLATRIX®

DIE HARTGIPSBINDE FÜR DIE RUHIGSTELLUNG

Die **Platrix®** Hartgipsbinde vereint alle Eigenschaften, die die Versorgung von Frakturen verlangt. Sie ist einfach in der Anwendung, sehr gut anmodellierbar und zudem in jeder Anwendung wirtschaftlich.

Material: Baumwollträger mit Naturgipsmischung



Vorteile auf einen Blick

- Ausgezeichnete Modellierbarkeit
- Hohe Endfestigkeit
- Kosteneffizient
- Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

Anwendungsgebiete

- Primärversorgung von Frakturen
- Sonstige Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer:
Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Platrix® Hartgipsbinden, eingeseigelt zu 2 Binden			
0298300	6,0 cm x 2,0 m	20/20	07154025
0298400	8,0 cm x 2,0 m	20/20	07154031
0298500	10,0 cm x 2,0 m	20/20	07154048
0298600	12,0 cm x 2,0 m	20/20	07154054
0298700	15,0 cm x 2,0 m	20/20	07154060
Platrix® Hartgipsbinden, eingeseigelt zu 4 Binden			
0292400	5,0 cm x 3,0 m	40/40	07154077
Platrix® Hartgipsbinden, eingeseigelt zu 2 Binden			
0292500	8,0 cm x 3,0 m	20/20	07154083
0292600	10,0 cm x 3,0 m	20/20	07154108
0292700	12,0 cm x 3,0 m	20/20	07154114
0292800	15,0 cm x 3,0 m	20/20	07154120
0292900	20,0 cm x 3,0 m	10/10	07154137

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Platrix® Longetten, 100 m, 4-fach gelegt			
0297300	10,0 cm x 25,0 m	1/1	01939127
0297400	12,0 cm x 25,0 m	1/1	01939133
0297500	15,0 cm x 25,0 m	1/1	01939156
0297600	20,0 cm x 25,0 m	1/1	01939162

BIPLATRIX®

DIE SCHNELLGIPSBINDE FÜR DIE RUHIGSTELLUNG

Die **Biplatrix®** Schnellgipsbinde ist das Produkt der Wahl, wenn bei Frakturen eine schnellere Immobilisierung erforderlich ist. Sie ist vor allem für die Primärversorgung geeignet. **Biplatrix®** ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich.

Material: Baumwollträger mit Naturgipsmischung



Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Immobilisierung
- Sehr gute Modellierbarkeit
- Hohe Endfestigkeit
- Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

Anwendungsgebiete

- Primär- und Sekundärversorgung von Frakturen
- Sonstige Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer:
Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Biplatrix® Schnellgipsbinden, eingeseigelt zu 2 Binden, 2 m			
0201000	6,0 cm x 2,0 m	20/20	07154143
0201100	8,0 cm x 2,0 m	20/20	07154166
0201200	10,0 cm x 2,0 m	20/20	07154172
0201300	12,0 cm x 2,0 m	20/20	07154189
0201400	15,0 cm x 2,0 m	20/20	07154195
Biplatrix® Schnellgipsbinden, eingeseigelt zu 4 Binden, 3 m			
0291100	5,0 cm x 3,0 m	40/40	07154203
Biplatrix® Schnellgipsbinden, eingeseigelt zu 2 Binden, 3 m			
0291200	8,0 cm x 3,0 m	20/20	07154226
0291300	10,0 cm x 3,0 m	20/20	07154232
0291400	12,0 cm x 3,0 m	20/20	07154249

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
0291500	15,0 cm x 3,0 m	20/20	07154255
0291600	20,0 cm x 3,0 m	10/10	07154261
Biplatrix® Longette, 100 m, 4-fach gelegt			
0291900	10,0 cm x 25,0 m	1/1	01342530
0291800	12,0 cm x 25,0 m	1/1	01598732
0292000	15,0 cm x 25,0 m	1/1	01342547
0292100	20,0 cm x 25,0 m	1/1	01342553

SPECIALIST® E

GIPSBINDEN UND LONGETTEN FÜR EINE RIGIDE IMMOBILISATION

Specialist® E Gipsbinden sind besonders gefragt, wenn eine rigide Immobilisierung gesichert werden soll. Specialist® E ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt verfügbar.

Material: Baumwollträger mit Naturgipsmischung



Vorteile auf einen Blick

- Perforierter Bindenkern für eine gleichmäßige Aktivierung des Materials
- Strapazierfähig
- Hohe Formbarkeit und Anschmiegsamkeit
- Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

Anwendungsgebiete

- Versorgung von Frakturen
- Sonstige Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Specialist® E, Gipsbinden			
7226000	5,0 cm x 2,7 m	1/4	00643100
7226001	7,5 cm x 2,7 m	1/1	00643117
7226002	10,0 cm x 2,7 m	1/1	00643123
7226003	12,5 cm x 2,7 m	1/1	00643146
7226004	15,0 cm x 2,7 m	1/1	00643152
7226005	20,0 cm x 2,7 m	1/1	00643169
Specialist® E, Gipslongetten			
7225900	10,0 cm x 20,0 m	1/1	00643175
7225901	12,5 cm x 20,0 m	1/1	00643181
7225902	15,0 cm x 20,0 m	1/1	00650962
7225903	20,0 cm x 20,0 m	1/1	00650979

POLSTERWATTEN UND SCHLAUCHVERBÄNDE

Die fachgerechte Anlage von **Starr- und Stützverbänden** erfordert eine Vielzahl von Schritten, um ein optimales Ergebnis für den Patienten zu erzielen. Vor der eigentlichen Anlage von Verbänden jeder Art steht der Hautschutz zur Vermeidung von Druckstellen und Hautirritationen im Vordergrund.

Wasserabweisende Produkte sind in der modernen Cast-Therapie nicht mehr wegzudenken. Der Grund: Patienten können ihrer gewohnten täglichen Hygiene uneingeschränkt nachkommen. **Delta-Dry®** stellt die neueste Generation in diesem Segment dar und bietet außergewöhnliche Produkteigenschaften.

Die Kombination aus traditionellen Materialien wie z.B. Schlauchverband und Polsterung bietet insbesondere exponierten Stellen (z.B. Knochenvorsprüngen) einen optimalen Schutz. Zusätzlich wird die **Krepppapierbinde** zur Vorfixierung der Extremität und zur Komprimierung des Polstermaterials eingesetzt, um eine verlässliche Ruhigstellung zu gewährleisten.



PRODUKTÜBERSICHT

WASSERFESTE POLSTERWATTE UND SCHLAUCHVERBÄNDE

Delta-Dry® Softliner S. 35

Delta-Dry® Polsterwatte S. 37

POLSTERSCHLAUCHVERBÄNDE

Delta Terry-Net™ S S. 38

Delta Terry-Net™ C S. 39

TRIKOTSCHLAUCHVERBÄNDE

Tricofix® S. 40

Delta-Net® Stockinette S. 41

POLSTERWATTEN

Artiflex® S. 42

Artiflex® Soft S. 42

Artiflex® Natur S. 42

Delta-Rol® S S. 43

Delta-Rol® S. 44

Specialist® S. 45

POLSTERZUBEHÖR


Tensoban® S. 46

Krepppapierbinde S. 47

DELTA-DRY®

HYGIENE-VERGLEICH

Im direkten Vergleich zeigt sich der hohe Hygienestandard von **Delta-Dry®** deutlich. Nach mehreren Wochen Tragedauer ist der Cast mit **Delta-Dry® Softliner** noch fast strahlend weiß.

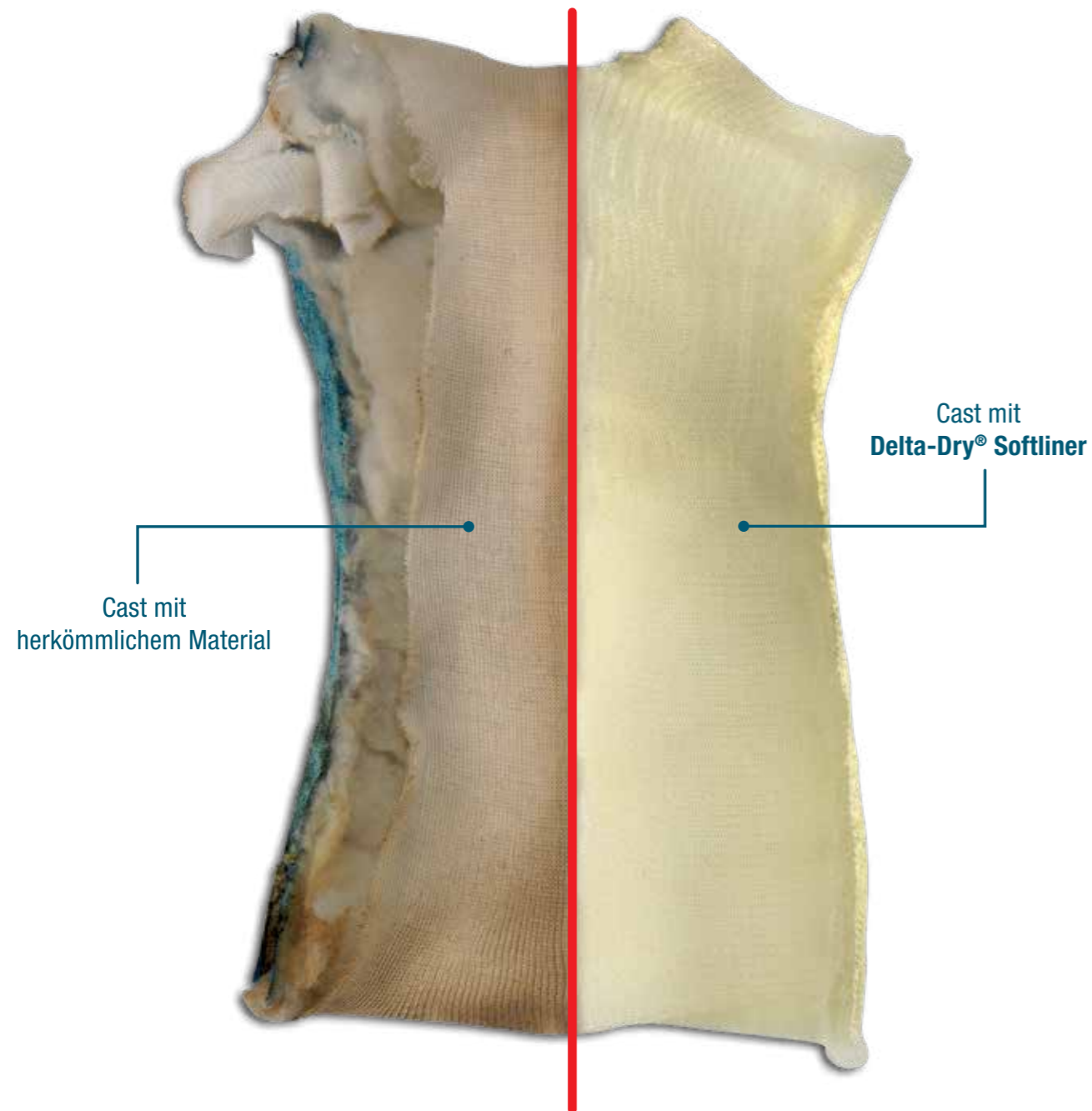

DELTA-DRY® SOFTLINER


DER NEUE STANDARD DER MODERNEN CAST-THERAPIE

Wasserabweisende Produkte sind in der modernen Cast-Therapie nicht mehr wegzudenken. Der Grund: Patienten können wie gewohnt Hände waschen, duschen und schwimmen gehen.

Der **Delta-Dry® Softliner** setzt hier neue Maßstäbe für Anwender und Patient: Bessere Hygiene, hoher Patientenkomfort, weniger ungeplante Cast-Wechsel und eine extrem einfache Applikation.

Hygiene und Wohlbefinden

- Trotz Cast kann der Patient der täglichen Handhygiene für einen wirksamen Gesundheitsschutz nachgehen
- Durch die vielfältigen Hygienemöglichkeiten werden Gerüche, Hautmazerationen und Juckreiz reduziert
- Das weiche Material sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
- Das Durchspülen des Castes mit fließendem kaltem Wasser hat einen schmerzlindernden Effekt und steigert das Wohlbefinden des Patienten

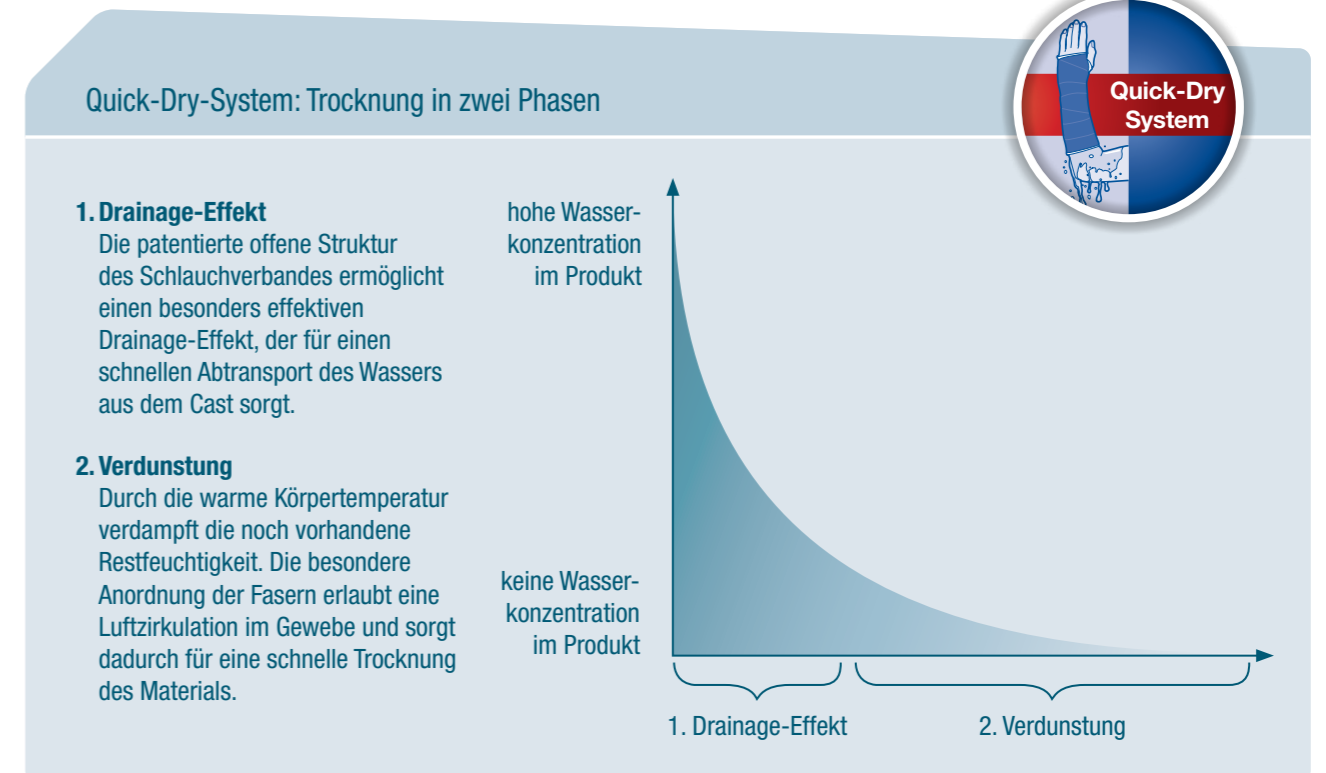

Quelle: BSN medical, interne Untersuchung

DELTA-DRY® SOFTLINER

DIE HYGIENISCHE LÖSUNG, DIE ALLES MITMACHT

Delta-Dry® stellt die moderne Komfortklasse im Segment der Unterpolsterung dar. Der wasserdurchlässige Polsterschlauchverband **Delta-Dry® Softliner** garantiert eine optimale Polsterung, somit wird keine zusätzliche Polsterwatte benötigt. Die besondere Struktur der Fasern gewährleistet einen schnellen Abtransport von eindringendem Wasser. Dadurch wird Hautirritationen, Juckreiz und Gerüchen vorgebeugt.

Material: 3D-Stretch-Gewebe, 100 % Nylon



Vorteile auf einen Blick

- Wasserdurchlässig
- Hygienisch
- Verringert Hautirritationen
- Schnelltrocknend
- Einfaches Anlegen, keine neue Technik zu lernen
- Keine ungeplanten Cast-Wechsel
- Keine zusätzliche Polsterwatte notwendig
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synth. Stützverbänden
- Nicht dislozierte bzw. minimal dislozierte Frakturen, Verstauchungen
- Synth. Stützverbände an Unterarm und Unterschenkel

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Dry® Softliner			
7277901	2,5 cm x 10,0 m	1/4	09531348
7277902	5,0 cm x 10,0 m	1/4	09531354
7277903	7,5 cm x 10,0 m	1/3	09531360
7277904	10,0 cm x 10,0 m	1/2	09531383
7277905	12,5 cm x 10,0 m	1/2	09531408

Hinweis:
Zusätzlicher Schutz durch Polsterwatte. Bei prominenten Knochenvorsprüngen kann die Delta-Dry® Polsterwatte für einen zusätzlichen Schutz eingesetzt werden. Sie besitzt die gleichen erstklassigen Hygiene- und Trocknungseigenschaften wie der Delta-Dry® Softliner.

DELTA-DRY® POLSTERWATTE

DIE WASSERFESTE POLSTERWATTE UNTER SYNTHETISCHEN STÜTZVERBÄNDE

Neben dem wasserdurchlässigen Material der **Delta-Dry® Polsterwatte** sorgt vor allem das patentierte atmungsaktive Strickgewebe für einen schnellen Abtransport von eindringendem Wasser und eine schnelle Trocknung der Polsterwatte. Dadurch werden Hautmazerationen, Juckreiz und Gerüche erheblich reduziert.

Material: 80 % Polypropylen, 18 % Nylon, 2 % Polyester und ein Acrylatkleber



Vorteile auf einen Blick

- Hoher Hygienestandard
- Waschbares Gwebematerial
- Schnelle Materialtrocknung
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Besonders anpassungsfähig
- Hautverträglich
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synth. Stützverbänden
- Nicht dislozierte bzw. minimal dislozierte Frakturen, Verstauchungen
- Synth. Stützverbände an Unterarm und Unterschenkel

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Dry® Polsterwatte			
7344303	5,0 cm x 2,4 m	1/12	00593336
7344304	7,5 cm x 2,4 m	1/12	00613180
7344305	10,0 cm x 2,4 m	1/12	00615492

DELTA TERRY-NET™ S

DER SYNTHETISCHE FROTTEESCHLAUCH AUCH MIT DAUMENEINSCHLUSS

Der **Delta Terry-Net™ S** ist ein synthetischer Frotteeschlauch, der gleichzeitig polstert und die Haut so vor den Einwirkungen des harten Castmaterials schützt. Das bauschige Material schont die Haut bei lang andauernden Behandlungen.

Material: 95 % Polyester, 3 % Nylon, 2 % Spandex

Vorteile auf einen Blick

- Hautfreundlich
- Hoher Tragekomfort
- Schneller Abtransport der Feuchtigkeit nach außen
- Schnelle Applikation
- Mit Daumeneinschluss erhältlich
- Optimale Passform
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von synth. Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung von Schienen
- Unterzugsmaterial für Funktionelle-Cast-Therapie (FCT)

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta Terry-Net™ S			
7230600	5,0 cm x 13,5 m	1/2	00855813
7230601	7,5 cm x 13,5 m	1/2	00855919
7230602	10,0 cm x 13,5 m	1/2	00855925
7230603	12,5 cm x 13,5 m	1/1	00855954
7230604	15,0 cm x 13,5 m	1/1	00855960
Delta Terry-Net™ S, mit Daumeneinschluss			
7230800	7,5 cm x 38,0 cm	10/180	02176157
7230801	7,5 cm x 46,0 cm	10/180	02176387
7230802	5,0 cm x 38,0 cm	10/180	02176111
7230803	5,0 cm x 46,0 cm	10/180	02176134

DELTA TERRY-NET™ C

DER FROTTEESCHLAUCH AUS BAUMWOLLE

Dank seines hochwertigen und elastischen Baumwollmaterials sorgt **Delta Terry-Net™ C** für einen hohen Tragekomfort und eine optimale Passform. Der Frotteeschlauch überzeugt durch sein hautfreundliches Baumwollmaterial.

Material: 100 % Baumwolle

Vorteile auf einen Blick

- Hochwertiges Material
- Hautverträglich
- Hoher Tragekomfort
- Schnelle Anwendung
- Faltenfreie Anlage
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von synth. Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung von Schienen
- Unterzugsmaterial für Funktionelle-Cast-Therapie (FCT)

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta Terry-Net™ C			
7230500	5,0 cm x 13,5 m	1/2	00855428
7230501	7,5 cm x 13,5 m	1/2	00855434
7230502	10,0 cm x 13,5 m	1/2	00855440
7230503	12,5 cm x 13,5 m	1/1	00855799
7230504	15,0 cm x 13,5 m	1/1	00855807

TRICOFIX®

DER ELASTISCHE BAUMWOLLSCHLAUCHVERBAND

Ein Schlauchverband muss nicht nur besonders hautfreundlich sein, sondern auch an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden können, ohne dass dabei Laufmaschen entstehen. **Tricofix®** hat sich gerade hier seit Jahren bewährt. Er lässt sich dehnen und verjüngt sich durch Strecken wieder.

Material: 100 % Baumwolle



Vorteile auf einen Blick

- Nahtlos gewirkt
- Hautverträglich
- Besonders elastisch
- Hohe Flexibilität des Materiales passt sich jeder Körperregion an
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Verband- und Hautschutz unter Starr- und Stützverbänden
- Unter klebenden und entlastenden Verbänden
- Fixierung von Wundauflagen und Verbänden

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Tricofix® Trikot-schlauchverband, weiß, gerollt, im Spenderkarton			
A/1: Finger und Zehen			
0219100	1,5 cm x 20,0 m	1/22	01868930
B/2: Finger, Zehen und geschiente Finger			
0219200	2,5 cm x 20,0 m	1/15	01868947
C/3: Hände und Kinderarme			
0219300	4,0 cm x 20,0 m	1/9	01868953
D/5: Hände, Arme, Füße und Unterschenkel Erwachsener			
0219500	6,0 cm x 20,0 m	1/24	01868976
E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe			
0219700	8,0 cm x 20,0 m	1/20	01868982
F/7: Oberschenkel und große Köpfe			
0219800	10,0 cm x 20,0 m	1/16	01868999

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe			
0219900	12,0 cm x 20,0 m	1/6	02059606
K: kleine Rümpfe			
0220100	16,0 cm x 10,0 m	1/18	01869007
L: große Rümpfe wie Mamma-, Hüft- und Höschchenverband			
0220200	21,0 cm x 10,0 m	1/12	01869013
Tricofix® Fingerverband, gebrauchsfertig, Karton mit 50 Stück			
0218400		1/8	02059612

DELTA-NET® STOCKINETTE

DER SYNTHETISCHE TRIKOTSCHLAUCHVERBAND

Delta-Net® Stockinette ist ein synthetischer Trikot-schlauchverband, der die Haut vor den Einwirkungen des Castmaterials schützt. Er ermöglicht ein anatomisch passgenaues, hautnahes Anlegen des Cast-Verbandes, ohne dass eine zusätzliche Polsterung bei der Behandlung notwendig wird. **Delta-Net® Stockinette** ist besonders geeignet für den Hautschutz unter semi-rigiden Stützverbänden wie Delta-Cast® Soft und in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.

Material: 100 % Polyester



Vorteile auf einen Blick

- Sehr anpassungsfähig
- Elastisch
- Hautverträglich
- Feuchtigkeitsabweisend
- Einfache und schnelle Anwendung
- Hoher Tragekomfort
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Hautschutz unter semi-rigiden Stützverbänden
- Hautschutz unter Starr- und Stützverbänden
- Verbandschutz
- Fixierung von Wundauflagen und Verbänden

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Net® Stockinette				
7230705	weiß	2,5 cm x 22,8 m	1/2	15238813
7230700	weiß	5,0 cm x 22,8 m	1/2	00855380
7230701	weiß	7,5 cm x 22,8 m	1/2	00855397
7230702	weiß	10,0 cm x 22,8 m	1/2	00855405
7230703	weiß	15,0 cm x 22,8 m	1/1	00855411
7272300	schwarz	2,5 cm x 22,8 m	1/2	16127412
7272301	schwarz	5,0 cm x 22,8 m	1/2	16127429
7272302	schwarz	7,5 cm x 22,8 m	1/2	16127435
7272303	schwarz	10,0 cm x 22,8 m	1/2	16127441
7272304	schwarz	15,0 cm x 22,8 m	1/1	16127458

ARTIFLEX®, ARTIFLEX® SOFT, ARTIFLEX® NATUR

DIE HOCHGEBAUSCHTE POLSTERBINDE ZUR UNTERPOLSTERUNG VON STARR- UND STÜTZVERBÄNDEN

Durch ihr bauschiges Material schützen Polsterbinden exponierte Stellen vor eventuellen Druckstellen, verursacht durch Gips- oder Castmaterial. Ob steril oder aus 100 % Naturfasern – das Sortiment von **Artiflex®** bietet individuelle Lösungen je nach Behandlungsmethode.

Material: Artiflex® und Artiflex® Soft bestehen aus 100 % synthetischen Fasern. Artiflex® Natur besteht aus 100 % Naturfasern.



Vorteile auf einen Blick

- Luftdurchlässig
- Hautverträglich
- Anschmiegsam
- Weiche Oberflächenstruktur
- Faltenfreier Sitz
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung harter Kanten und Schienen
- Unterpolsterung von lymphologischen und phlebologischen Verbänden

Anwendungsdauer:
Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Artiflex®, Einzelbinde lose im Karton			
0904400	6,0 cm x 3,0 m	50/50	07154350
0904600	10,0 cm x 3,0 m	30/30	07154367
0904700	15,0 cm x 3,0 m	20/20	07154373
0904800	20,0 cm x 3,0 m	15/15	07154396
Artiflex® Soft, Einzelbinde lose im Karton			
7286000	6,0 cm x 3,0 m	50/50	07154427
7286100	8,0 cm x 3,0 m	40/40	00196049
7286200	10,0 cm x 3,0 m	30/30	07154433
7286300	15,0 cm x 3,0 m	20/20	07154456
7286400	20,0 cm x 3,0 m	15/15	07154462

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Artiflex® Natur, Einzelbinde lose im Karton			
7287000	5,0 cm x 2,7 m	70/70	00196173
7287100	7,5 cm x 2,7 m	50/50	00196210
7287200	10,0 cm x 2,7 m	30/30	00196345
7287300	15,0 cm x 2,7 m	20/20	00196546
7287400	20,0 cm x 2,7 m	15/15	00196552

DELTA-ROL® S

DIE SYNTHETISCHE POLSTERWATTEBINDE MIT INTEGRIERTEM POLYURETHANTAPE

Delta-Rol® S ist eine Polsterwattebinde, die eine Kombination aus weichen Polyesterfasern und einer dünnen Schicht Polyurethanschaum bietet. Diese Beschaffenheit stellt eine Zeit- und Kostenersparnis gegenüber anderen Therapien dar, da zwei Produkte in einem integriert sind.

Material: Polyesterfasern und Polyurethanschaum



Vorteile auf einen Blick

- Polsterwirkung ohne Kantenbildung
- Autoklavierbar
- Integriertes Polyurethantape
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung von Schienen

Anwendungsdauer:
Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Rol® S			
7232200	5,0 cm x 2,75 m	12/120	08654238
7232201	7,5 cm x 2,75 m	12/144	08654250
7232202	10,0 cm x 2,75 m	12/108	08654273
7232203	15,0 cm x 2,75 m	12/72	08654304

DELTA-ROL®

DIE SYNTHETISCHE POLSTERWATTEBINDE

Delta-Rol® besteht aus Polyesterfasern und bietet als Polsterwattebinde optimale Polstereigenschaften, um die Haut bei einer oft über mehrere Wochen andauernden Behandlung zu schützen.

Material: 100 % Polyesterfasern



Vorteile auf einen Blick

- Polsterwirkung
- Autoklavierbar
- Glatte Oberfläche
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung harter Kanten und Schienen

Anwendungsdauer:
Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Rol®			
7231000	5,0 cm x 2,75 m	12/120	02743426
7231001	7,5 cm x 2,75 m	12/288	02743432
7231002	10,0 cm x 2,75 m	12/216	02743449
7231003	15,0 cm x 2,75 m	12/144	02743455

SPECIALIST®

POLSTERWATTEBINDE MIT HOHEM BAUMWOLLANTEIL

Specialist® wird aus besonders hautfreundlichem Material hergestellt und ist dadurch vor allem für den Einsatz zur Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden geeignet.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Acrylfaser



Vorteile auf einen Blick

- Hautverträglich
- Leicht abreißbar
- Gut haftender Lagenverbund
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden jeder Art und Größe
- Abpolsterung harter Kanten

Anwendungsdauer:
Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Specialist®			
7230400	5,0 cm x 3,6 m	24/144	02268801
7230401	7,5 cm x 3,6 m	12/72	02268824
7230402	10,0 cm x 3,6 m	12/72	02268847
7230403	15,0 cm x 3,6 m	6/36	02268876

TENSOBAN®

DIE POLSTERSCHAUMBINDE AUS POLYURETHANSCHAUM

Die Polsterschaumbinde **Tensoban®** sorgt für eine Vorkomprimierung des Polstermaterials unter Starr- und Stützverbänden. Die Vorkomprimierung dient dazu, dass zwischen Verband und Extremität nicht zu viel Spielraum entsteht.

Material: 100 % Polyurethanschaum

Vorteile auf einen Blick

- Luftdurchlässig
- Weiche Oberflächenstruktur
- Feuchtigkeitsabweisend
- Temperatenausgleichend
- Schnelle und einfache Anwendung
- Selbsthaftende Eigenschaft minimiert Verrutschen
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden
- Abpolsterung harter Kanten und Schienen bei Starr- und Stützverbänden

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Tensoban®			
7150008	7,0 cm x 20,0 m	12/108	03918336

KREPPPAPIERBINDE

ZUVERLÄSSIGE VORFIXIERUNG

Die Krepppapierbinde dient der initialen Vorfixierung des Stützverbandes. Sie sorgt für eine glatte Oberfläche des Polstermaterials, was das Anlegen des Cast-Verbandes erleichtert.

Material: 100 % Zellulose

Vorteile auf einen Blick

- Gute Lagenhaftung
- Gute Komprimierung des Polstermaterials
- Einfache Applikation
- Verhindert Eindringen von gipshaltigem Wasser in das Polstermaterial
- Sägeschutz bei der Gipsabnahme
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Vorkomprimierung des Polstermaterials von Starr- und Stützverbänden
- Vorfixierung der Extremitäten

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Krepppapierbinde, Einzelbinde lose im Karton			
0179000	4,0 cm x 4,0 m	50/200	03202543
0179100	6,0 cm x 4,0 m	20/200	03944641
0179200	8,0 cm x 4,0 m	20/200	03944658
0179300	10,0 cm x 4,0 m	20/200	03944664
0179400	12,0 cm x 4,0 m	20/200	03944670

GEHHILFEN UND ZUBEHÖR

Gehhilfen ermöglichen eine Fortbewegung mit Starr- und Stützverbänden an den unteren Extremitäten und vermitteln dem Patienten ein Gefühl von Sicherheit. Sie sollen das Laufen mit einem Verband unterstützen und den Abrollvorgang so natürlich wie möglich gestalten. Dabei sind sie leicht, sicher fixierbar und rutschfest.

Das innovative und umfassende **Zubehör** bietet dem Anwender die Möglichkeit, seine Cast-Verbände noch innovativer zu gestalten. Dadurch wird eine individuelle Patientenversorgung mit hohem Komfort gewährleistet. Diese Anforderungen erfüllt zum Beispiel die kohäsive Fixierbinde **Elastomull® haft**. Dank ihrer speziellen Eigenschaften ist sie für das Fixieren von Cast-Schienen besonders geeignet.



PRODUKTÜBERSICHT

GEHHILFEN

Artistep® S S. 50

Delta-Solo® Gehschuh S. 51

ZUBEHÖR

Delta Terry-Net™ Filzpolster S. 52

Delta Terry-Net™ Schaumpolster S. 53

Delta Terry-Net™ Randpolster S. 54

Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System S. 55

Elastomull® haft/Elastomull® haft color S. 56

ARTISTEP® S

DIE GEHSHOLE MIT RUTSCHFESTEM SPEZIALPROFIL FÜR DEN CAST- UND GIPSVERBAND

Artistep® S ist eine Gehsole für Starr- und Stützverbände, die wesentlich dazu beiträgt, das Sicherheitsgefühl von Patienten zu erhöhen. **Artistep® S** ist in sechs Größen erhältlich und kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

Material: Nylon, Polyethylen, PVC, thermoplastisches Gummi

Vorteile auf einen Blick

- Schnelles und einfaches An- und Ausziehen
- Optimale Passform
- Rutschfest
- Wasser- und Schmutzabweisend
- Stabile Klettbinden für sichere Fixierung
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Gehhilfe für Patienten mit Ober- oder Unterschenkelverband
- Für synthetische und Naturgips-Verbände

Anwendungsdauer:

Einige Tage bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Größe für Schuhgröße	Verp.-Einheit	PZN
Artistep® S			
4556400	Größe P (25 – 30)	1/10	00948905
4556500	Größe XS (31 – 34)	1/10	00948911
4556600	Größe S (35 – 38)	1/10	00948928
4556700	Größe M (39 – 41)	1/10	00948934
4556800	Größe L (42 – 43)	1/10	00948940
4556900	Größe XL (44 – 47)	1/10	00948957

DELTA-SOLO® GEHSCHUH

DIE ANATOMISCHE GEHSHOLE MIT SICHEM SITZ

Die Klettverschlüsse und das spezielle Sohlenprofil des **Delta-Solo® Gehschuhs** sorgen für einen festen Stand und sicheren Halt bei jedem Wetter auf nahezu allen Oberflächen. **Delta-Solo® Gehschuh** gibt es sowohl mit bereits vormontierten Klettbinden oder wahlweise auch einzeln als Gehsole mit separaten Klettverschlüssen. So steht für jeden individuellen Bedarf das passende Produkt zur Verfügung. Das gute Abrollverhalten sorgt für einen hohen Tragekomfort. **Delta-Solo® Gehschuh** ist sowohl für den rechten als auch für den linken Fuß anwendbar.

Material: Abriebfestes, weiches, synthetisches Gummi

Vorteile auf einen Blick

- Individuelle Fixierung durch Klettverschlüsse
- Leicht anzulegen
- Rutschfest
- Waschbar
- Fersenkappe für einen sicheren Halt
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Für alle Arten von Gehverbänden wie synthetische oder Naturgips-Verbände

Anwendungsdauer:

Einige Tage bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Solo® Gehschuh			
7229812	XS (< 34)	10/10	08799037
7229813	S (34 – 36)	10/10	04380258
7229814	M (36 – 40)	10/10	04380264
7229815	L (40 – 44)	10/10	04380270
7229816	XL (44 – 48)	10/10	04380287
Klettverschlüsse für Delta-Solo® Gehschuh			
7229817	40 cm	20/360	04991571
7229818	50 cm	20/360	04991619
7229819	60 cm	20/360	04991594

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta-Solo® Gehschuh mit vormontierten Klettbinden			
7229840	XS (< 34)	10/10	11027628
7229841	S (34 – 36)	10/10	11027634
7229842	M (36 – 40)	10/10	11027640
7229843	L (40 – 44)	10/10	11027657
7229844	XL (44 – 48)	10/10	11027663

DELTA TERRY-NET™ FILZPOLSTER

SELBSTKLEBENDES FILZPOLSTER

Das **Delta Terry-Net™** selbstklebende Filzpolster eignet sich ideal zur Polsterung von Schienen und zur punktuellen Polsterung exponierter Stellen. Das Polster ist vollflächig klebend. Durch die hohe Klebewirkung ist eine optimale Fixierung gewährleistet.

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Vorteile auf einen Blick


- Klebt vollflächig
- Faltenfreies Anlegen
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Polsterung von Schienen
- Punktuelle Polsterung exponierter Stellen

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen

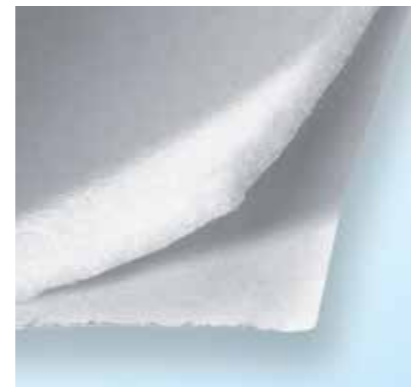

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta Terry-Net™ Filzpolster			
7229505	58,0 cm x 1,0 m	1/1	02177205

DELTA TERRY-NET™ SCHAUMPOLSTER

SELBSTKLEBENDES SCHAUMPOLSTER

Das **Delta Terry-Net™** selbstklebende Schaumpolster eignet sich ideal zur Polsterung von Schienen und zur punktuellen Polsterung exponierter Stellen. Das Polster ist vollflächig klebend. Durch die hohe Klebewirkung ist eine optimale Fixierung gewährleistet.

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Vorteile auf einen Blick

- Vollflächig klebend
- Mit Frottee beschichtet
- Faltenfreies Anlegen
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Polsterung von Schienen
- Punktuelle Polsterung exponierter Stellen

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta Terry-Net™ Schaumpolster			
7229506	58,0 cm x 1,0 m	1/1	02177085

DELTA TERRY-NET™ RANDPOLSTER

DAS SELBSTKLEBENDE RANDPOLSTER

Das **Delta Terry-Net™ Randpolster** ist ein selbstklebendes, stark haftendes Vliespolster zum Abpolstern von harten Kanten. Das Material kann unter leichtem Zug optimal anmodelliert werden. Das **Delta Terry-Net™ Randpolster** ist in Weiß und in Blau erhältlich.

Material: 100 % Baumwolle

Vorteile auf einen Blick

- Vollflächig klebend
- Optimal anmodellierbar
- Leicht zu fixieren
- Starke Klebkraft für sicheren Halt
- Hoher Tragekomfort
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Abpolsterung harter Kanten bei Cast-Verbänden

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta Terry-Net™ Randpolster				
7229507	weiß	3,2 cm x 13,5 m	1/52	02176631
7229508	blau	3,2 cm x 13,5 m	1/52	01416955
7229510	blau	8,0 cm x 13,5 m	1/14	09205850

DELTA TERRY-NET™ KLETTVERSCHLUSS-SYSTEM

DAS SELBSTKLEBENDE KLETTVERSCHLUSS-SYSTEM

Das **Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System** erleichtert die Anlage von FCT-Schienen und Braceverbänden. Es besteht aus einem selbstklebenden Haftband und einem elastischen Flauschband.

Material: Nylon, Farbstoffe, Silikon, Farbstoffierungsmittel, Harze

Vorteile auf einen Blick

- Einfache Anwendung
- Sichere Fixierung
- Starke Klebkraft für einen sicheren Halt
- Latexfrei

Anwendungsgebiete

- Sorgt für optimale Anlage von funktionellen Cast- und Braceverbänden

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System, Haftband			
7229500	2,5 cm x 9,0 m	1/20	02582041
7229502	5,0 cm x 9,0 m	1/20	00795525
Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System, elastisches Flauschband			
7229501	2,5 cm x 13,5 m	1/20	02582006
7229503	5,0 cm x 13,5 m	1/20	00795531

ELASTOMULL® HAFT /COLOR

DIE AUF SICH SELBST HAFTENDE, ELASTISCHE, LATEXFREIE FIXIERBINDE

Elastomull® haft eignet sich besonders zum Fixieren von Castschienen. Durch die besondere Beschichtung haften die einzelnen Wickellagen sehr sicher aufeinander, was ein Verrutschen der Fixierbinde verhindert.

Material: 40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid



Vorteile auf einen Blick

- Kein Verrutschen der Binde beim Fixieren von Castschienen
- Faltenfreier Sitz
- Materialsparende Applikation
- Anhaltende ausgezeichnete Elastizität

Anwendungsgebiete

- Zur Fixierung von Castschienen und Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- Als leichter Stützverband nach Gips- oder Tapeabnahme

Anwendungsdauer:

Bis zu mehreren Wochen




LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Elastomull® haft			
4547500	4,0 cm x 20,0 m	1/24	02507080
4547600	6,0 cm x 20,0 m	1/24	02507097
4547700	8,0 cm x 20,0 m	1/24	02507105
4547800	10,0 cm x 20,0 m	1/24	02507111
4547900	12,0 cm x 20,0 m	1/24	02507128
4724600	6,0 cm x 20,0 m	6/24	06618451
4724900	8,0 cm x 20,0 m	6/24	06618468
4730300	10,0 cm x 20,0 m	6/24	06618474

(Länge gedehnt)

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Elastomull® haft color				
4537100	blau	6,0 cm x 20,0 m	1/24	01412549
4537200	blau	8,0 cm x 20,0 m	1/24	01412555
4537300	blau	10,0 cm x 20,0 m	1/24	01412561
4537400	rot	6,0 cm x 20,0 m	1/24	01412578
4537500	rot	8,0 cm x 20,0 m	1/24	01412584
4537600	rot	10,0 cm x 20,0 m	1/24	01412590

(Länge gedehnt)

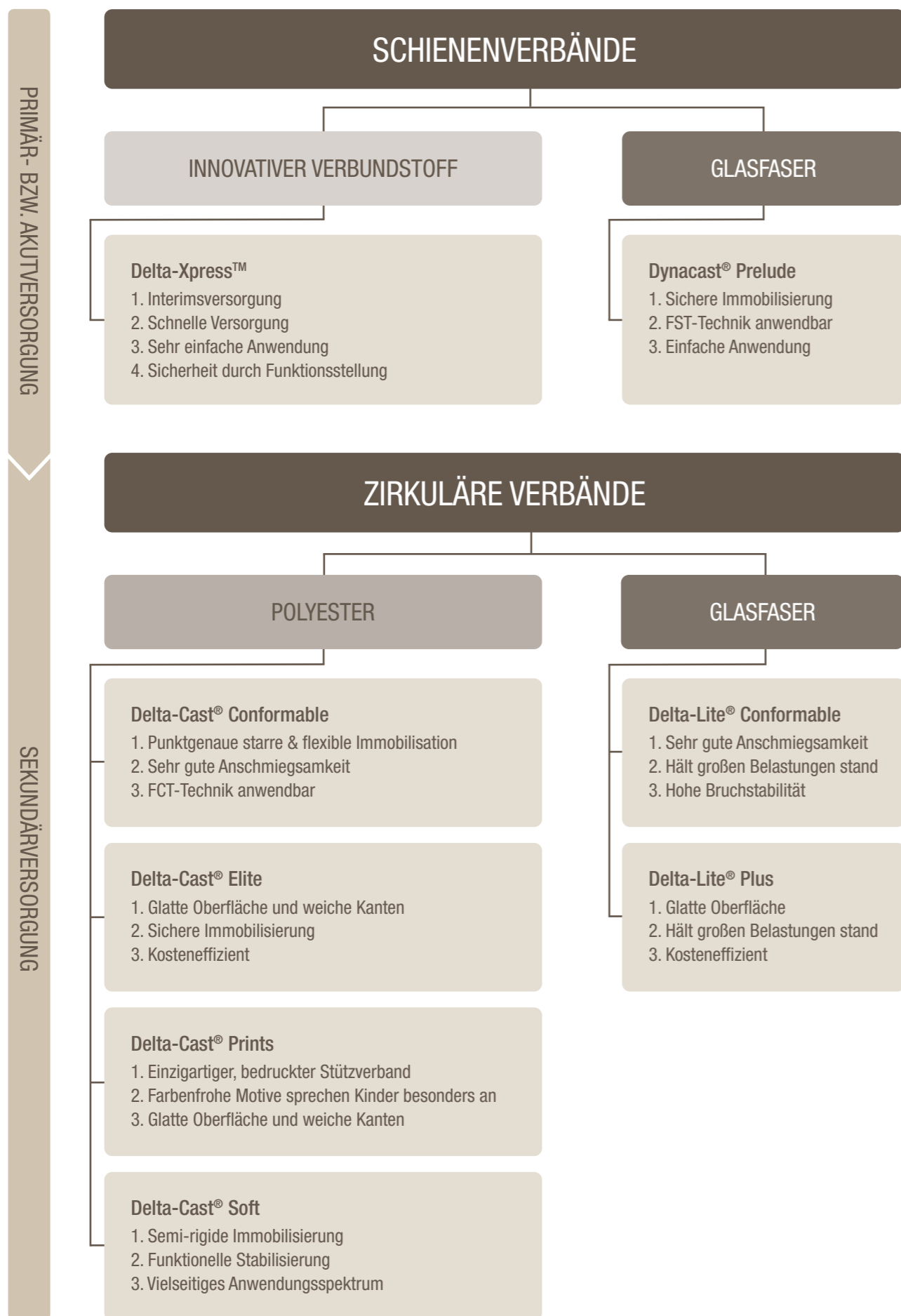

DELTA-CAST® – IHR PARTNER IN DER FRAKTURVERSORGUNG

	Primär- bzw. Akutversorgung		Sekundärversorgung						
	Delta-Xpress™	Dynacast® Prelude	Dynacast® Prelude	Delta-Cast® Conformable	Delta-Cast® Soft	Delta-Cast® Elite	Delta-Cast® Prints	Delta-Lite® Conformable	Delta-Lite® Plus
	VERBUNDSTOFF (100% Röntgen-transparent)	GLASFASER	POLYESTER (100% Röntgentransparent)				GLASFASER		
Sehr starre Immobilisierung	••	•••	•••	••		•	•	•••	•••
Starre & flexible Anteile im Cast hilft Muskelatrophien vorzubeugen				•••	•••	•	•		
Geringe Immobilisierung				•	•••				
Einsetzbar bei Frakturen und Ruhigstellung	••	•••	•••	•••	••				
Funktionelle Therapie (frühe Mobilisierung möglich)			•••	•••	•••				
Einfache Anlage des Verbandes (Quer- und längselastisch)				•••	••	••	••	••	
Tragekomfort während der Therapie (weiche Kanten)		•	•	••	•••	••	••	•	•
Glatte Oberfläche ist besonders sanft zu Kleidungsstücken				••	•••	•••	••	•	•••
Für Kinder besonders gut geeignet (Motive und Beschaffenheit)					•••		•••		
Offenporiges Gewebe hilft das Hautklima zu fördern		•	•	•••	••	••	•	•••	••
Öffnen ohne Castsäge möglich (abhängig von der Lagenanzahl)	•••	•••	•••	•••	•••	••	••		
Legende									
	•••	Erfüllt die Anforderungen besonders gut							
	••	Erfüllt die Anforderungen gut							
	•	Basis Anforderung werden erfüllt							

EFFEKTIVE THERAPIEN ERFORDERN EIN UMFASSENDES KNOW-HOW

Wir sind stolz darauf, weltweit Schulungen, Fortbildungen, Veranstaltungen und Medien zur Unterstützung unserer Kunden anbieten zu können.

FORTBILDUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

Dank der hohen Kompetenz und langjährigen Erfahrung unserer Anwendungsberater bieten wir Ihnen professionelle Fortbildungen sowie individuelle Workshops an. Denn wir möchten, dass Sie in Ihrer Behandlung noch erfolgreicher werden und auf dem aktuellen Therapiestand bleiben. Unsere Immobilisationschulungen bieten Ihnen Antworten auf Ihre Herausforderungen im Klinik- und Praxisalltag.

**Ihre Patienten werden Werbeträger Ihres Hauses sein!
Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne.**

SCHULUNGSMATERIALIEN FÜR DEN ARBEITSALLTAG

Zusätzlich bieten wir Ihnen unterschiedliche Schulungsmaterialien an, die sich durch intensive Zusammenarbeit mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal exakt am Bedarf von Anwendern orientieren. So werden Sie in Ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt.

- Frakturposter und Poster zur Anlegetechnik für die orthopädische Praxis, die Notaufnahme und das Verbandszimmer
- Anwendungsbroschüren für Cast- und Schienenverbände
- Patienteninformationsblöcke
- Wickelanleitungen und Arbeitsanweisungen

Wenn Sie sich für spezielle Fortbildungen oder Schulungsmaterialien interessieren, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter hilft Ihnen gerne weiter.

TRAININGSVIDEOS FÜR DEN ALLTAG IM CAST-RAUM



Auf dem Delta-Cast® Youtube-Kanal bieten wir Ihnen eine große Auswahl von Trainingsvideos zu leistungsstarken Produkten aus unserem Sortiment der Frakturversorgung an.

Besuchen Sie uns auf unserem Videokanal und folgen Sie dazu einfach dem QR-Code oder diesem Link:

www.youtube.com/bsnmedicalworldwide

Oder geben Sie bei Youtube „Delta-Cast“ in das Suchfenster ein.

Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Lehrvideoangebot bestmöglich in Ihrem Alltag im Cast-Raum unterstützen.

ESSITY KUNDEN SERVICE CENTER

Wir freuen uns über Ihre Anfragen und Anregungen – gleich ob per Telefon / Fax oder E-Mail.

ADRESSE / POSTANSCHRIFT

Hans-Böckler-Straße 43 – 45
30851 Langenhagen

Telefon **0511 – 6781 110**

Fax **0511 – 6781 132**

E-Mail **KundenServiceCenter@essity.com**

Servicetelefon

Unser Servicetelefon ist bundesweit
Mo.–Do. von 8.00–18.00 Uhr
und Fr. von 8.00–17.00 Uhr zu erreichen.

BANKVERBINDUNG

Commerzbank AG, Hamburg
BIC: DRESDEFF 200
IBAN: DE87 2008 0000 0911 1190 00



FÜR IHRE FRAKTUR- VERSORGUNG – ALLES AUS EINER HAND

Delta-Cast® ist Ihr Partner für den Cast-Raum. Wir unterstützen Sie im Klinik- und Praxisalltag bei der Anlage von **Starr-** und **Stützverbänden**.

Unser Sortiment bietet Ihnen individuelle Lösungen, einfache und verlässliche Applikation, sowie hohen Tragekomfort für Ihre Patienten.



Delta-Cast®
We know casting.



IM CASTRAUM GESCHULT!

MIT DEM YOUTUBE-KANAL „FRACTURE MANAGEMENT“

Auf diesem Videokanal bieten wir Ihnen eine große Auswahl von Trainingsvideos zu leistungsstarken Produkten aus unserem Sortiment der Frakturversorgung an.

Besuchen Sie uns auf unserem Videokanal und folgen Sie dazu einfach dem QR-Code oder diesem Link:
www.youtube.com/bsnmedicalworldwide

Oder geben Sie bei Youtube „Delta-Cast“ in das Suchfenster ein.

Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Lehrvideoangebot bestmöglich in Ihrem Alltag im Cast-Raum unterstützen.



BSN medical GmbH An Essity company

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Deutschland
www.bsnmedical.de
Tel. +49 40 / 49 09-45 45
Fax +49 40 / 49 09-66 66

Essity Austria GmbH

Storchengasse 1
1150 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 89901-724
Fax +43 (0)1 89901-551

Essity Switzerland AG

Parkstrasse 1b
6214 Schenkon
Schweiz
Tel. +41 (0)848 810 150
Fax +41 (0)800 810 150